

Maples e Cadeiras de Descanso



CD.1310



CD.1311



CD.1312



CD.1313



CD.1330



CD.1360



CD.1365



10.1313.A.0816



CD.1390/3



CD.1391/2



10.1315.A.1576

DEFINIÇÃO

Os **Maples e Cadeiras de Descanso** foram concebidos para o repouso de utentes na posição de sentado ou deitado.

ATENÇÃO: Os maples e as cadeiras não servem de degrau ou escada.
Não suba para os assentos, pode danificá-los ou desequilibrar-se e cair.

Ao desembalar tenha cuidado para não danificar as partes estofadas, plásticas, madeira ou pintadas.

Antes de utilizar, manusear ou limpar este produto deve ler atentamente as indicações seguintes e as recomendações do fabricante.

Este manual refere-se aos produtos cuja referência são:

Ref.	ESTRUTURA				COSTAS		APOIO				Peso Kg
	Epoxy		Inox		Fixas	Reclináveis	BRAÇOS		PERNAS	PÉS	
	Tacos	Rodas	Tacos	Rodas			Fixos	Rebatíveis			
CD.1310	✓						✓				35
CD.1311								✓			25
CD.1312		✓									26,4
CD.1313	✓								✓		25,5
10.1313.A.0816								✓			18,2
CD.1314						✓			✓		26,4
CD.1315		✓									36,4
10.1315.A.1576											
10.1315.A.1653											
CD.1316			✓					✓			23
CD.1317				✓							24
CD.1330	✓				✓						18
CD.1360		✓				✓	reguláveis		✓		32
CD.1365								✓		✓	37
CD.1390	Composto por espuma e napa										0,25
CD.1391											0,4
CD.1392											
CD.1393											0,25


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM e OUTRAS INDICAÇÕES A TER EM CONTA

Os Maples e Cadeirões de Descanso são fornecidos montados, sendo apenas necessário remover a embalagem.


- ✓ Ter em atenção para o perigo de esmagamento nas zonas de articulação/regulação.
- ✓ Deve-se ter especial atenção com o manuseamento de objetos cortantes perto dos componentes estofados.
- ✓ Os maples e os cadeirões de descanso contêm componentes inflamáveis devendo ser protegidos de qualquer fonte de ignição e/ou produto inflamável.
- ✓ Os maples e os cadeirões de descanso permitem uma abertura do estofa aproximada de 180° permitindo o descanso também na posição de deitado ou semideitado.
- ✓ É conveniente a movimentação do maple ou cadeirão c/ tacos por 2 pessoas, evitando arrastá-los pelo chão.
- ✓ Os maples e os cadeirões de descanso com rodas não devem ser usados como carro de transporte.
- ✓ Os maples e os cadeirões de descanso com rodas deverão ser travados quando não estão em movimento.
- ✓ Os maples e os cadeirões de descanso não devem ser usados para outro fim que não seja aquele para o qual foram concebidos.
- ✓ As referências CD.1310/1/2/3/4/5/6/7 suportam um peso máximo admissível de 120 Kg.
- ✓ Os cadeirões referências CD.1360/5 suportam um peso máximo admissível de 150 Kg.
- ✓ Não deve usar os apoios de braços, de pernas, de pés ou costas para se sentar.

DIMENSÕES


CD.1311

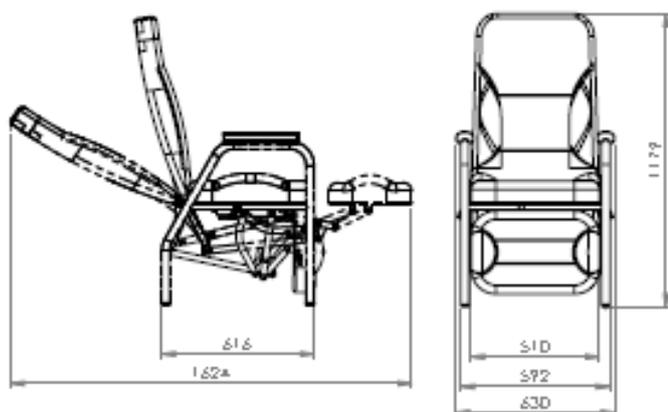

CD.1314

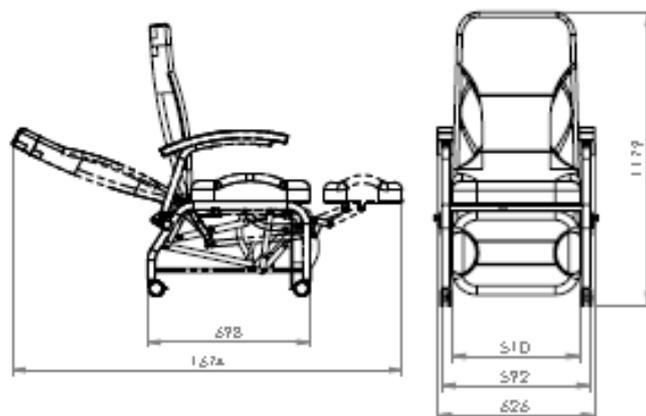


CD.1330

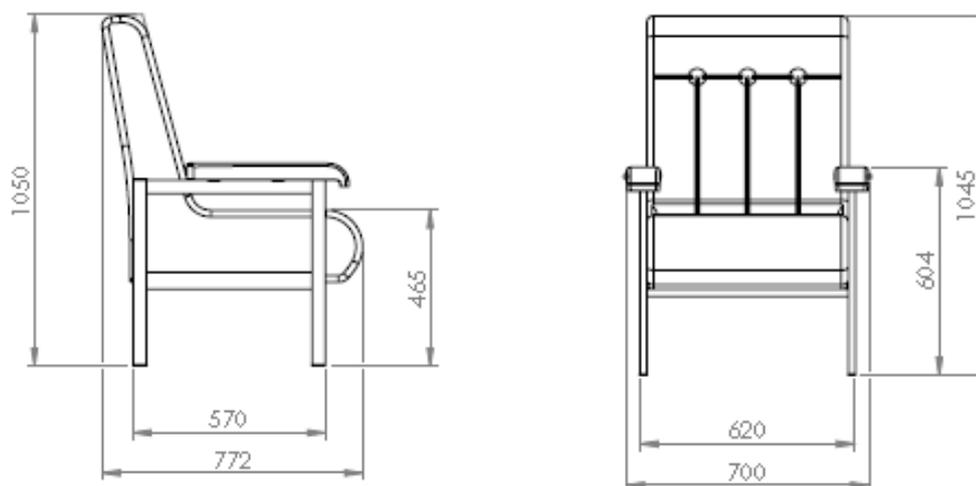

CD.1390




1 - Tiras de velcro

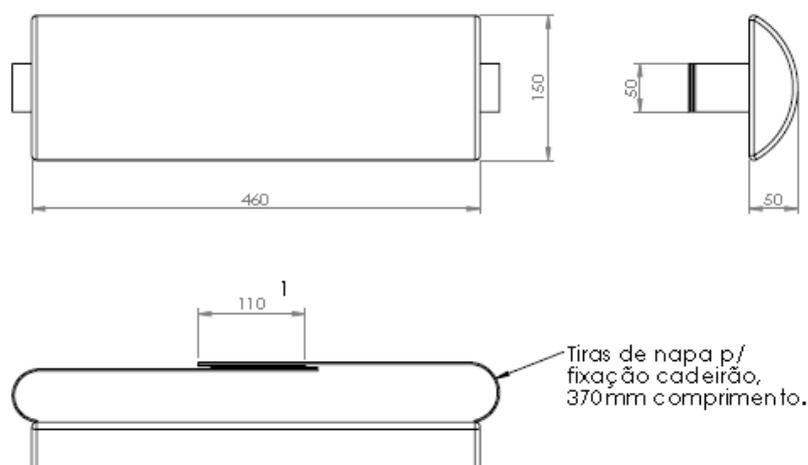

CD.1391



1 - Tiras de velcro

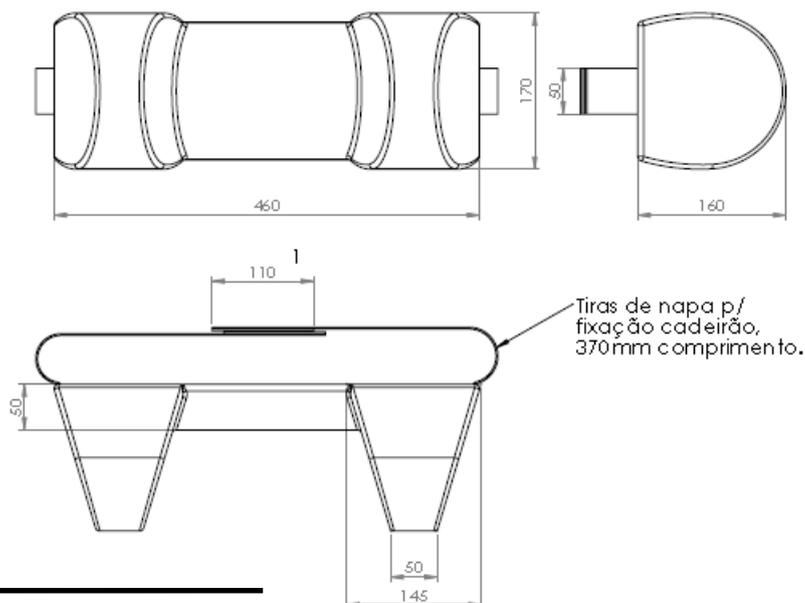

LIMPEZA

- ✓ Nas operações de limpeza não utilizar detergentes e/ou materiais que possam danificar ou riscar este produto.
- ✓ Para uma melhor conservação das napas recomendamos a limpeza com um pano húmido e sabão neutro secando-as com um pano seco de seguida.
- ✓ Nas operações de limpeza e desinfeção recomenda-se a utilização de um produto apropriado para limpeza e desinfeção de dispositivos médicos. A frequência da limpeza deverá ser determinada em função das necessidades, do local onde este produto se encontra e das vezes que é usado.
- ✓ **Nunca utilize** estações de lavagem automática, lavagem em túnel, água a alta pressão ou sprays líquidos, nas operações de limpeza. Corre o risco de danificar o acabamento/pintura.
- ✓ Não utilize solventes como benzeno, álcool ou substâncias semelhantes!

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

- ✓ Os mapes e cadeirões são fornecidos embalados em cartão e fio ou filme ou ainda em caixa de cartão, sendo necessário apenas a remoção da embalagem.
- ✓ Os mapes e cadeirões devem ser transportados e armazenados sempre que possível na posição horizontal. Não devem ser empilhados.
- ✓ Não devem ser armazenados em locais húmidos. Devem estar protegidos de eventuais quedas de objetos.
- ✓ A JMS não assume qualquer responsabilidade por danos causados por mau uso, desrespeito destas ou outras indicações ou negligência na utilização e manuseamento do produto.
- ✓ À JMS reserva-se o direito de efetuar qualquer alteração ao design, funcionalidade, estética e comercialização dos seus produtos, em qualquer altura, sem aviso prévio, bem como, a atualização deste manual sempre que necessário.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE

A JMS preocupa-se com a preservação do Ambiente em tudo o que faz. Solicitamos que:

- ☞ Separe os resíduos da embalagem e os encaminhe para os ecopontos correspondentes ou para operadores licenciados.
- ☞ Após o tempo de vida útil, entregue o produto a um operador licenciado.
- ☞ Não coloque o produto no lixo junto de resíduos comuns.
- ☞ Obrigado pela sua colaboração!

